


RISE™ INSTALLATION INSTRUCTIONS



4.5" BASIC RAISED TOILET SEAT + SUPPORT ARMS

888.722.6488 | ToiletSeats.com

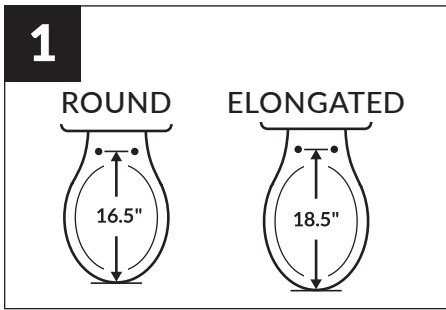

1 Confirm your toilet size.

Confirma el tamaño de tu sanitario


Confirmez la taille de vos toilettes.

Tool Needed

Herramientas requeridas

Outils requis

5/8" (16 mm)

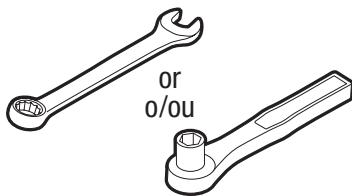





SCAN FOR VIDEO



Hardware Kit Includes

El kit de instalación incluye


Le kit de matériel inclut

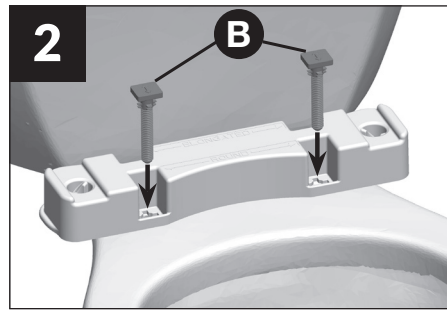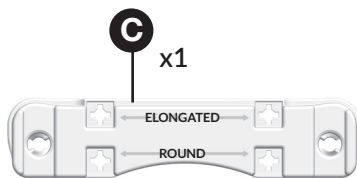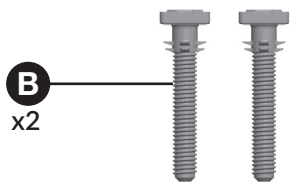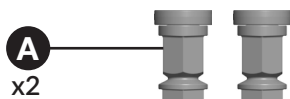

2 With curved edge of (C) facing the bowl, align the correct size mounting holes and slide (B) thru (C) into the toilet seat mounting holes.

Con el borde curvo de (C) mirando hacia la taza, alinee los orificios de montaje del tamaño correcto y deslice (B) a través de (C) dentro de los orificios de montaje del asiento del sanitario.

Avec le bord incurvé de (C) tourné vers la cuvette, alignez les trous de montage de taille correcte et glissez (B) à travers (C) dans les trous de montage du siège des toilettes.

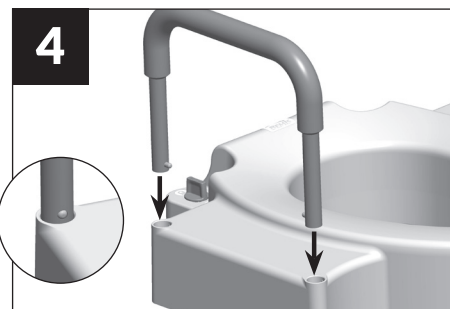

4 Press lock buttons and slide arms into seat.

Presione los botones de bloqueo y deslice los brazos hacia el asiento.


Appuyez sur les boutons de verrouillage et faites glisser les bras dans le siège.



6 Turn both keys to the locked position.

Gire ambas llaves a la posición de bloqueo.


Tournez les deux clés en position verrouillée.

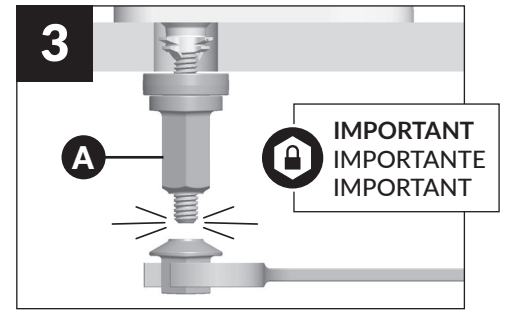

3 Holding seat centered on bowl, tighten (A) until lower portions SNAP OFF to prevent over-tightening and will NEVER LOOSEN.

Sosteniendo el asiento centrado en la taza, apriete (A) hasta que las partes inferiores se desprendan para evitar un ajuste excesivo y NUNCA SE AFLOJARÁ.

En maintenant le siège centré sur la cuvette, serrer (A) jusqu'à ce que les portions inférieures CASSENT pour éviter un serrage excessif et ne se desserrera JAMAIS.

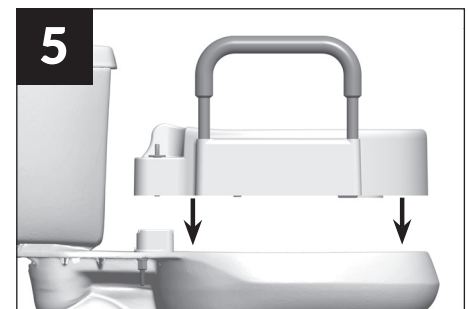


5 Align back of seat with (C) and set seat on top.

Alinee el respaldo del asiento con (C) y coloque el asiento encima.

Alignez l'arrière du siège avec (C) et placez le siège sur le dessus.




EASY-CLEAN® REMOVAL & CLEANING REMOVER & LIMPIAR | RETRAIT ET NETTOYAGE

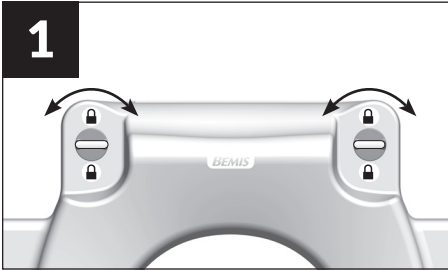

1 Turn both keys to the unlocked position.

Gire ambas llaves a la posición desbloqueada.


Tournez les deux clés en position déverrouillée.

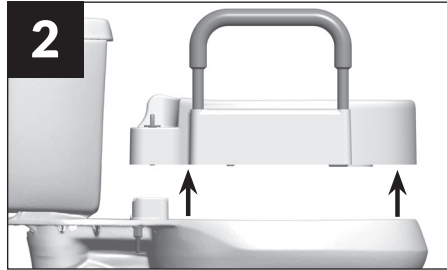

2 Pull seat up to disengage and remove. Clean only with mild cleaners using a soft, damp cloth, & towel dry.

Tire del asiento hacia arriba para desengancharlo y retirarlo. Limpie únicamente con limpiadores suaves usando un paño suave y húmedo y séquelo con una toalla.

Tirez le siège vers le haut pour le dégager et le retirer. Nettoyer uniquement avec des produits doux à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis sécher à l'aide d'une serviette.

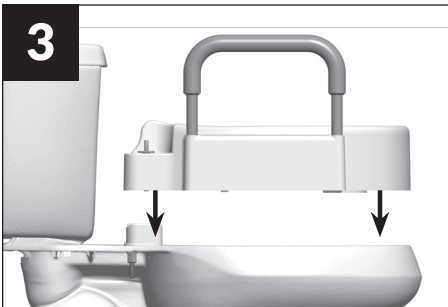

3 Place seat on bowl to reinstall.

Coloque el asiento en el sanitario para reinstalarlo.

Placez le siège sur la cuvette pour le réinstaller.



4 Turn both keys to the locked position.

Gire ambas llaves a la posición de bloqueo.

Tournez les deux clés en position verrouillée.

LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed against defects in material and workmanship for one year from date of purchase. If this product is defective, the exclusive remedy will be a replacement product of equal value. Expenses incurred during removal or installation are excluded.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto está garantizado contra defectos del material y la mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Si este producto resultara defectuoso, el remedio exclusivo será un producto de reemplazo de igual valor. Se excluyen los gastos incurridos durante la eliminación o instalación. Plástico adecuado para uso comercial y residencial; madera esmaltada sólo para uso residencial.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une durée d'un an. Si ce produit est défectueux, votre unique recours sera un produit de remplacement de valeur égale. Les frais de retrait et de remplacement ne sont pas couverts. Plastique adapté pour un usage commercial et résidentiel; bois émaillé pour usage résidentiel uniquement.

CARE & CLEANING

Clean only with mild cleaners using a soft, damp cloth, & towel dry.



Sin productos químicos agresivos
Pas de produits chimiques agressifs

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie solo con detergentes suaves usando un trapo suave, húmedo, y seque con una toalla.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec des détergents doux et un chiffon doux et humide, et sécher à l'aide d'une serviette.

STAY-TITE® – REMOVAL | REMOVER | RETRAIT



Remove nut with any 5/8" (16 mm) wrench
Quite la tuerca con cualquier llave de 5/8" (16 mm)
Retirer l'écrou avec une clé de 5/8" (16 mm)